

PRODUKTBESCHREIBUNG

TeleCare Careousel GSM



SMS Nachricht bei Nichteinnahme der Medikamente!

Beschreibung:

Oftmals werden Medikamente nicht zur richtigen Zeit eingenommen, miteinander verwechselt oder sogar schlichtweg vergessen. Dies kann das Wohlbefinden beeinträchtigen und im schlimmsten Fall sogar den Heilerfolg gefährden.

Careousel GSM von TeleCare stellt Ihnen mehrmals täglich zum richtigen Zeitpunkt das verordnete Medikament bereit. Dazu ertönt zweimal pro Minute ein unüberhörbares Signal und eine blinkende rote LED als visuelle Alarmierung. Erfolgt eine halbe Stunde lang keine Entnahme, wird das Medikament eingezogen, um eine Einnahme zum falschen Zeitpunkt zu verhindern.

Das Gerät besteht aus 28 Fächern, sodass der Vorrat bei täglich einer Entnahme für vier Wochen ausreicht. Durch die spezielle Verschlussvorrichtung ist sichergestellt, dass nur befugte Personen auf den Inhalt zugreifen können. Careousel GSM punktet zudem durch seine bequeme Handhabung – es ist schnurlos und ganz leicht zu transportieren.

Sollte das Medikament nicht eingenommen werden können bis zu drei Personen per SMS verständigt werden. Weiters sendet das Gerät Statusmeldungen wenn die Batterie schwach wird, Medikamente nur noch für vier Einnahmen ausreichen und wenn das Gerät für einen längere Zeit am Kopf steht.

Vorteile:

- Automatische Rückstellung des Alarm bei Medikamenten Einnahme
 - Richtige Tablette zum korrekten Zeitpunkt
 - 28 Vorratsfächer, dh. bei vier Tabletten pro Tag Vorrat für eine Woche
 - Eingebautes GSM Modul für SMS Alarmierung
 - Einzug der Tablette bei Nichteinnahme
 - Abschließbar
 - Optional: Webplattform für online Konfiguration
-

*Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.