

Kurzbedienungsanleitung FSA (FallSensorArmband) Vibby OAK

1 FSA aktivieren:

Vor der erstmaligen Benutzung des FSA muss dieser aktiviert werden:

- Drücken Sie hierfür auf die Notruftaste und halten Sie diese gedrückt bis die rote LED des FSA blinkt. (Bild 1 & 2)
- Während der Blinkphase lassen Sie die Notruftaste los. Der FSA vibriert nun kurz und ist betriebsbereit. (Bild 3)



2 Testmodus:

Der Testmodus wird nach der Aktivierung des FSA automatisch gestartet und dauert 5 Minuten. In dieser Zeit blinkt die grüne LED alle 5 Sekunden und der FSA kann nun auf seine Funktion getestet werden. Nach dem Testmodus blinkt die LED nochmals und der FSA vibriert. Die Verwendung des FSA ist nun möglich.

3 Funktionsweise:

Ein Fallalarm wird durch einen Sturz ausgelöst. Im Detail reagiert der FSA auf große Beschleunigung bzw. abruptes Abbremsen einer Bewegung.

Horizontale Bewegungen des Armes brechen den Alarm nicht ab, beispielsweise Bewegungen in unmittelbarer Auslösehöhe!

Der Handsender beginnt nach ca. 20 Sekunden mit der Voralarmphase in welcher der Alarm abgebrochen werden kann, sollte vor dieser Zeit der FSA vertikal bewegt werden (z.B beim Aufstehen), so wird kein Fallalarm ausgelöst.

4 Alarmabbruch:

Im Falle einer Auslösung, ohne vorangegangenen Sturz, gibt es die Möglichkeit den Alarm abbrechen

- Halten Sie in der Voralarmphase, in welcher der FSA 20 Sekunden rot blinkt und alternierend vibriert, die Hand für 2 Sekunden direkt auf die Notruftaste.
- Ist diese durch Ihre Hand abgedeckt, vibriert der FSA kurz durchgehend und die rote LED hört zu blinken auf.
- Der Alarm wird nicht an das Notrufgerät gesandt.



5 FSA deaktivieren:

Legen Sie den FSA flach auf den Tisch und führen Sie folgende Schritte durch:

- Drücken Sie auf die Notruftaste bis die rote LED leuchtet (Bild 1), während der Leuchtphase, der roten LED, drücken Sie die Notruftaste 5x schnell hintereinander (Bild 2 & 3).
- Der FSA vibriert nun und die rote LED blinkt kurz auf.



TeleCare Systems & Communication GmbH

Ricoweg 14/2

2351 Wiener Neudorf

Österreich

Telefon: +43 2236 90301 0

Email: office@telecaresystems.at

Web: www.telecaresystems.at

Version: 1.0