



# NOVO über die CMP programmieren, den Betriebszustand ändern und Notrufgerät suchen

## 1. NOVO über die CMP programmieren


1.1 Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die CMP ein. Sie werden automatisch auf die Registerkarte „Status“ weitergeleitet.

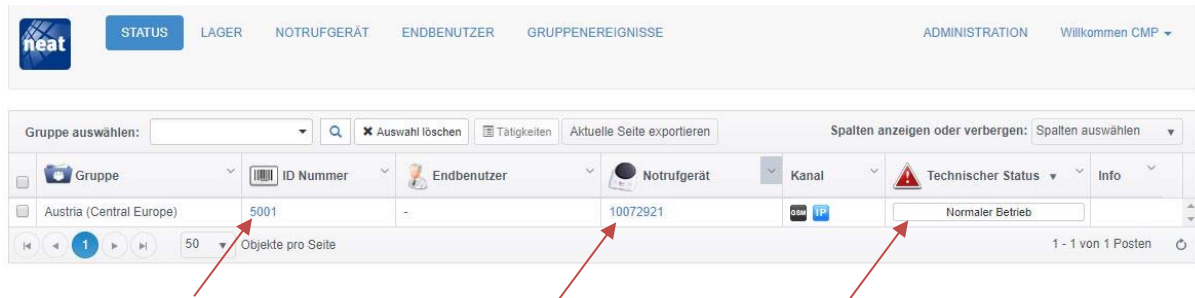

1.2 Klicken Sie bei dem Gerät welches Sie umprogrammieren möchten auf die ID-Nummer, Seriennummer oder den technischen Status. Sie gelangen nun automatisch in die Registerkarte „Notrufgerät“ mit den technischen Details zum ausgewählten Notrufgerät.

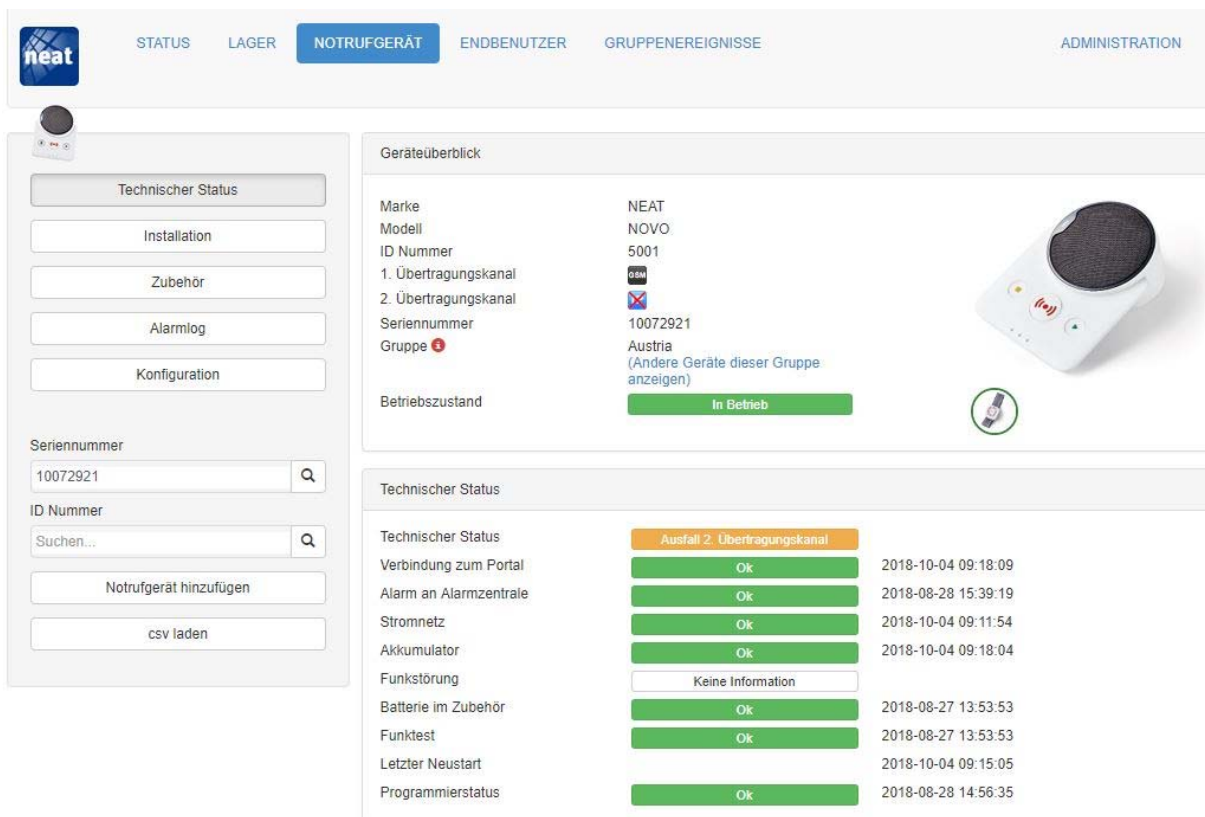

1.3 Öffnen Sie den Menüpunkt „Installation“, Sie sehen im unteren Bereich den Punkt „Betriebszustand“. Klicken Sie hier auf „Werte ändern“.

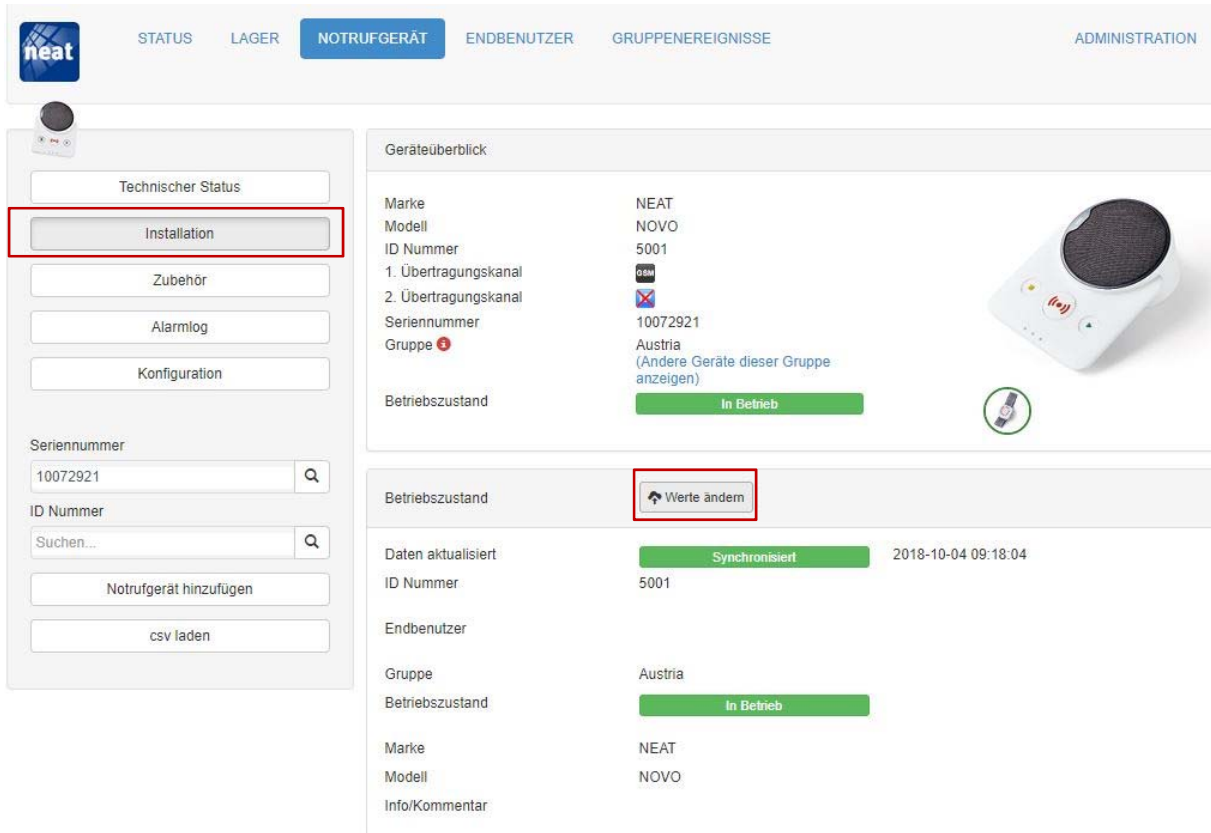




The screenshot shows the TeleCare Systems web interface. At the top, there is a navigation bar with the 'neat' logo and menu items: STATUS, LAGER, NOTRUFGERÄT (highlighted), ENDBENUTZER, GRUPPENEREIGNISSE, and ADMINISTRATION. On the left side, there is a sidebar menu with options: Technischer Status, Installation (highlighted with a red box), Zubehör, Alarmlog, and Konfiguration. Below the sidebar, there are search fields for 'Seriennummer' (with value 10072921) and 'ID Nummer' (with placeholder 'Suchen...'). At the bottom of the sidebar are buttons for 'Notrufgerät hinzufügen' and 'csv laden'. The main content area is divided into two sections. The top section, 'Geräteüberblick', displays device details: Marke (NEAT), Modell (NOVO), ID Nummer (5001), 1. Übertragungskanal (GSM), 2. Übertragungskanal (GSM), Seriennummer (10072921), and Gruppe (Austria). A green button labeled 'In Betrieb' is shown next to a device image. The bottom section, 'Betriebszustand', has a 'Werte ändern' button (highlighted with a red box) and a table of status information: 'Daten aktualisiert' (Synchronisiert, 2018-10-04 09:18:04), 'ID Nummer' (5001), 'Endbenutzer', 'Gruppe' (Austria), and 'Betriebszustand' (In Betrieb). A second set of device details is shown at the bottom of this section.

- 1.4 Wählen Sie nun im Dropdown-Menü „Konfiguration“ jenes Programmierfile aus welches auf das NOVO programmiert werden soll.

Bestätigen Sie die Auswahl und klicken Sie auf „Speichern“.

Geräteüberblick


Marke	NEAT	
Modell	NOVO	
ID Nummer	5001	
1. Übertragungskanal		
2. Übertragungskanal		
Seriennummer	10072921	
Gruppe <span style="color: red;">!</span>	Austria <small>(Andere Geräte dieser Gruppe anzeigen)</small>	
Betriebszustand	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 5px;">In Betrieb</span>	

Betriebszustand

Daten aktualisiert	Synchronisiert	2018-10-04 09:18:04
ID Nummer	<input type="text" value="5001"/>	
Konfiguration	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px;">--Ohne Datei--</div> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px;">--Ohne Datei--</div> <div style="padding: 2px;">Testfile zur Programmierung (CSV)</div> </div>	
Endbenutzer	<input type="text"/>	
Neuer Endbenutzer	<input type="text"/>	
Gruppe	<input type="text" value="Austria"/>	
Betriebszustand	<input type="text" value="In Betrieb"/>	
Marke	<input type="text" value="NEAT"/>	
Modell	<input type="text" value="NOVO"/>	
Info/Kommentar	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

- 1.5 Sobald Sie auf „Speichern“ geklickt haben, wird das NOVO mit dem nächsten „Heartbeat“ konfiguriert. Dieser wird automatisch alle 30 Minuten gesendet oder kann auch händisch durch Drücken der gelben Taste am NOVO sofort durchgeführt werden.


- 1.6 Um die Programmierung überprüfen zu können, gehen Sie zum Menüpunkt „Konfiguration“ und klicken Sie dem Punkt „Alles Lesen“ an, nachdem entweder der Heartbeat abgewartet oder manuell die gelbe Taste gedrückt wurde. Es erscheinen während dem Auslesen des Gerätes blaue Pfeile neben den programmierbaren Werten, diese verschwinden, wenn das NOVO vollständig ausgelesen wurde. Um dies zu Beschleunigen kann wieder die gelbe Taste am Gerät gedrückt werden.

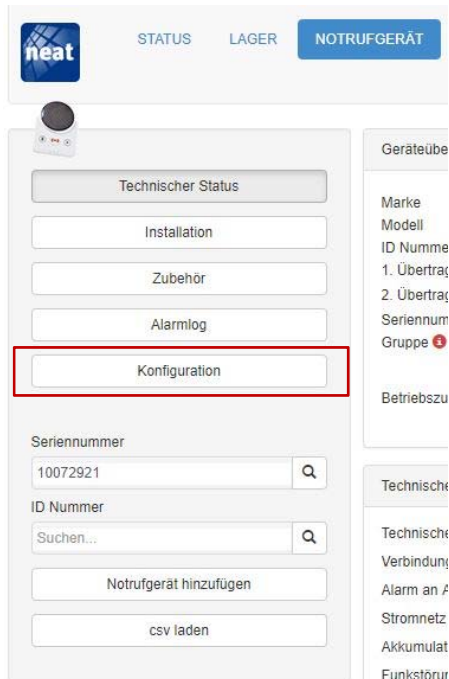


## 2. Betriebszustand ändern

Um unbenutzte Geräte vom „Status“ wieder in das „Lager“ zu verschieben gehen Sie wie folgt vor:

- 2.1 Wählen Sie das Gerät welches nicht mehr verwendet wird aus der Liste in der Registerkarte „Status“ mit einem Klick auf die ID-Nummer, Seriennummer oder dem technischen Status aus. Das Gerät wird in der Registerkarte „Notrufgerät“ geöffnet und es werden die technischen Details sichtbar.

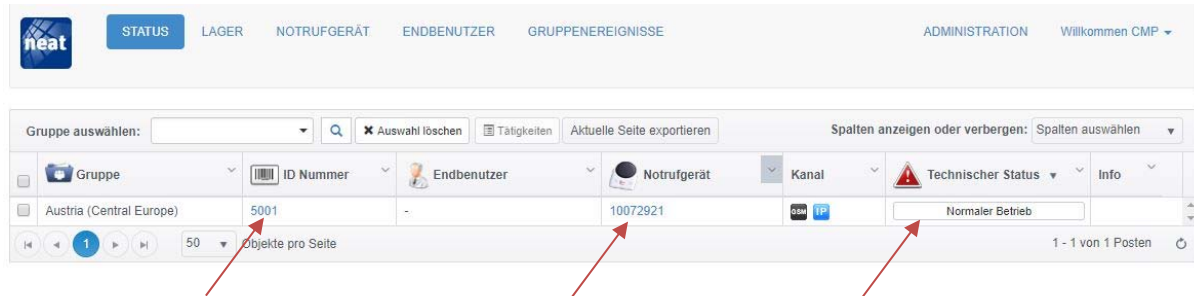

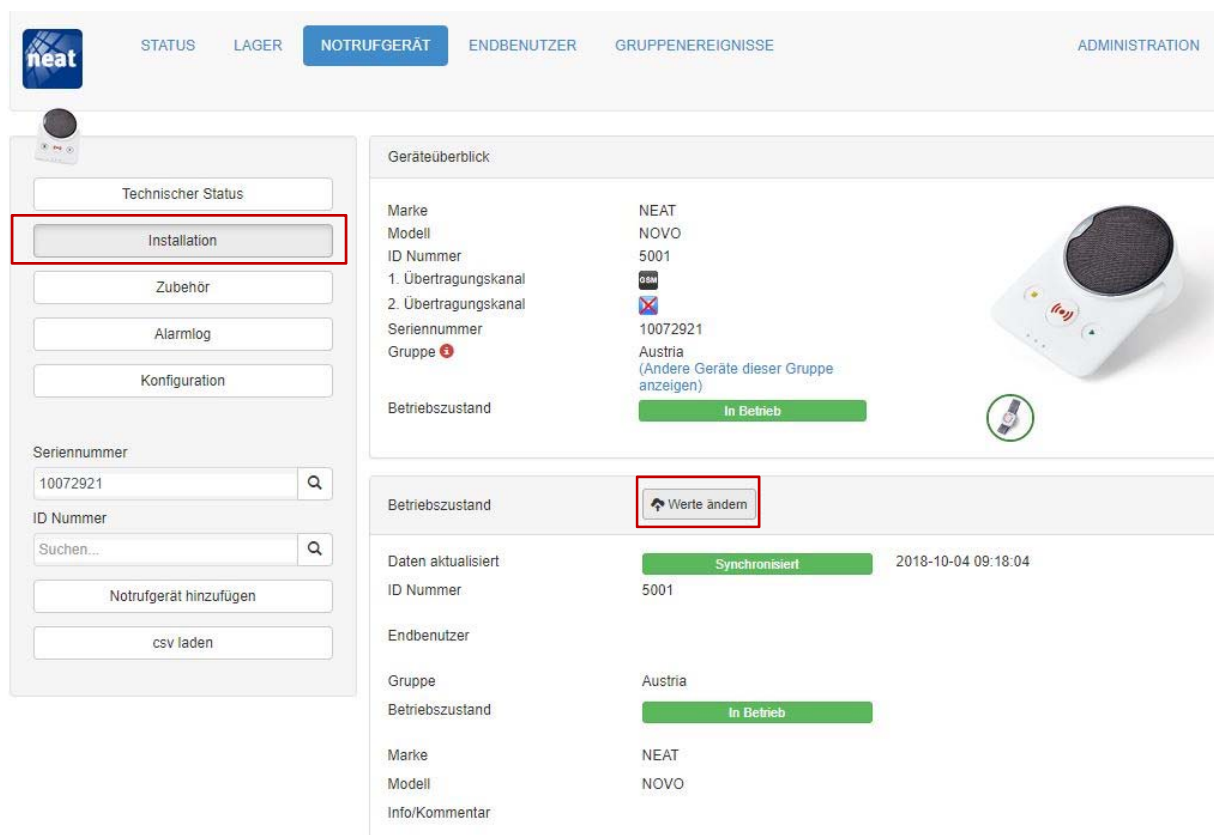

- 2.2 Öffnen Sie den Menüpunkt „Installation“ und wählen Sie beim Punkt „Betriebszustand“ den Unterpunkt „Werte ändern“.



2.3 Wählen Sie beim Dropdown-Menü beim Feld „Betriebszustand“ den Zustand „Nicht in Gebrauch“ aus und bestätigen Sie die Auswahl mit „Speichern“.

Geräteüberblick ↻

Marke	NEAT	
Modell	NOVO	
ID Nummer	5001	
1. Übertragungskanal		
2. Übertragungskanal		
Seriennummer	10072921	
Gruppe <span style="color: red;">!</span>	Austria <small>(Andere Geräte dieser Gruppe anzeigen)</small>	
Betriebszustand	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 10px; border: 1px solid green;">In Betrieb</span>	

Betriebszustand 
Speichern
Abbrechen

Daten aktualisiert	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 10px; border: 1px solid green;">Synchronisiert</span>	2018-10-04 09:36:00
ID Nummer	<input type="text" value="5001"/>	
Konfiguration	<input type="text" value="--Ohne Datei--"/>	
Endbenutzer	<input type="text" value="--Ohne Endbenutzer--"/>	
Neuer Endbenutzer	<input type="text"/>	
Gruppe	<input type="text" value="Austria"/>	
Betriebszustand	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px 10px; border: 1px solid #4a86e8;">In Betrieb</span> <ul style="list-style-type: none"> <li style="padding: 2px 10px;">Warten auf Installation</li> <li style="padding: 2px 10px;">Nicht in Gebrauch</li> <li style="padding: 2px 10px;">Zur Reparatur</li> <li style="padding: 2px 10px;">Abgelaufen</li> </ul> </div>	
Marke		
Modell		
Info/Kommentar	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

2.4 Das Gerät ist nun aus der Liste in der Registerkarte „Status“ gelöscht und wird in der Registerkarte „Lager“ angezeigt.

 STATUS **LAGER** NOTRUFGERÄT ENDBENUTZER GRUPPENEREIGNISSE ADMINISTRATION Willkommen

---

Gruppe auswählen:  
Auswahl löschen
Tätigkeiten
Aktuelle Seite exportieren
Spalten anzeigen oder verbergen: Spalten auswählen

	Gruppe	ID Nummer	Endbenutzer	Notrufgerät	Kanal	Betriebszustand	Info
<input type="checkbox"/>	Austria (Central Europe)	5001	-			<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">Nicht in Gebrauch</span>	

⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩

50 Objekte pro Seite 1 - 1 von 1 Pos




**Hinweis:** das Alarmlog des Gerätes wird nach dem Definieren des Betriebszustandes von „In Betrieb“ zu „Warten auf Installation“ nicht gelöscht oder zurückgesetzt!

### 3. Notrufgerät suchen

Um ein Notrufgerät, bei welchem die Seriennummer oder ID-Nummer bekannt ist, zu suchen muss wie folgt vorgegangen werden:

#### 3.1 Wechseln Sie in die Registerkarte „Notrufgerät“.

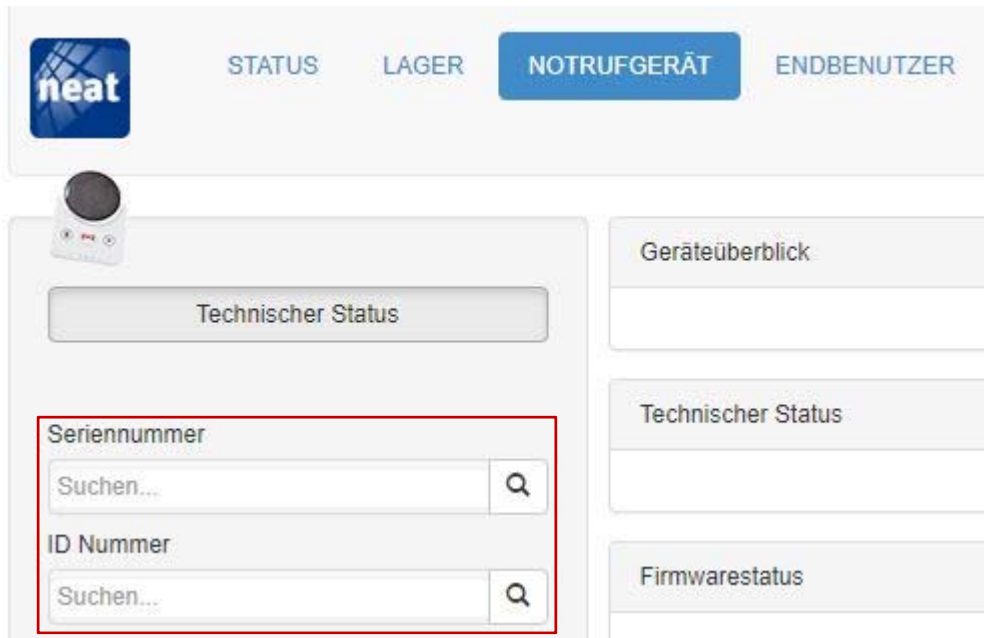

#### 3.2 Geben Sie entweder die Seriennummer oder ID-Nummer ein.



**Hinweis:** Beim Eingeben der ersten Stellen werden automatisch Serien- oder ID-Nummern vorgeschlagen welche bereits angelegt sind.

#### 3.3 Bestätigen Sie die Auswahl mit der Enter-Taste oder der Lupe neben dem Eingabefeld. Die Geräteeinstellungen werden angezeigt und Sie können die Geräteeinstellungen kontrollieren oder umprogrammieren.

