

## NOVO über die CMP auslesen, ändern des Betriebszustands und Notrufgerät suchen

## 1. NOVO über die CMP auslesen

1.1 Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die CMP ein. Sie werden automatisch auf die Registerkarte "Status" weitergeleitet.

ne	STATUS LAGER	R NOTRUFGERÄT	ENDBENUTZER GRUPPENE	REIGNISSE		ADMINISTRATION WI	likommen CMP 👻
Gru	uppe auswählen:	- Q X Aus	wahl löschen	elle Seite exportieren	Spalten anzeig	gen oder verbergen: Spalter	auswählen v
	Gruppe 🗸 🗸	ID Nummer ~	Endbenutzer 🛛 👻	Notrufgerät	Kanal 🛛 🖌 🧎	Technischer Status 🔹	∼ Info ∼
	Austria (Central Europe)	5001		10072921		Normaler Betrieb	:
H		Objekte pro Seite		×		1-1	von 1 Posten 💍

1.2 Klicken Sie bei dem Gerät welches Sie auslesen möchten auf die ID-Nummer, Seriennummer oder den technischen Status. Sie gelangen nun automatisch in die Registerkarte "Notrufgerät" mit den technischen Details zum ausgewählten Notrufgerät.

neat STATUS LAGEF	NOT	RUFGERÄT ENDBENUTZER	GRUPPENEREIGNISSE	ADMINISTRATION
2 M 2		Geräteüberblick		
Technischer Status		Marka	NEAT	
Installation		Modell ID Nummer	NOVO 5001	
Zubehör		1. Übertragungskanal 2. Übertragungskanal	asm	
Alarmlog		Seriennummer Gruppe 🕄	10072921 Austria	
Konfiguration			(Andere Geräte dieser Gruppe anzeigen)	
Seriennummer		Betriebszustand	In Betrieb	
10072921	Q	Technischer Status		
ID Nummer		Technisener otatus		
Suchen	Q	Technischer Status	Ausfall 2. Übertragungskanal	
		Verbindung zum Portal	Ok	2018-10-04 09:18:09
Notrufgerät hinzufügen		Alarm an Alarmzentrale	Ok	2018-08-28 15:39:19
csv laden		Stromnetz	Ok	2018-10-04 09:11:54
		Akkumulator	Ok	2018-10-04 09:18:04
		Funkstörung	Keine Information	
		Batterie im Zubehör	Ok	2018-08-27 13:53:53
		Funktest	Ok	2018-08-27 13:53:53
		Letzter Neustart		2018-10-04 09:15:05



1.3 Um die Programmierung auslesen zu können, gehen Sie zum Menüpunkt "Konfiguration" und klicken Sie dem Punkt "Alles Lesen" an, nachdem entweder der Heartbeat abgewartet oder manuell die gelbe Taste gedrückt wurde. Es erscheinen während dem Auslesen des Gerätes blaue Pfeile neben den programmierbaren Werten, diese verschwinden, wenn das NOVO vollständig ausgelesen wurde. Um dies zu Beschleunigen kann wieder die gelbe Taste am Gerät gedrückt werden.





## 2. Betriebszustand ändern

Um unbenutzte Geräte vom "Status" wieder in das "Lager" zu verschieben gehen Sie wie folgt vor:

2.1 Wählen Sie das Gerät welches nicht mehr verwendet wird aus der Liste in der Registerkarte "Status" mit einem Klick auf die ID-Nummer, Seriennummer oder dem technischen Status aus. Das Gerät wird in der Registerkarte "Notrufgerät" geöffnet und es werden die technischen Details sichtbar.

n	eat	LAGER	NOTRUFGERÄT	ENDBENUTZER GRUPPE	NEREIGNISSE			ADMINISTRATION	Willk	ommen CMP -	•
G	ruppe auswählen:		- Q X At	uswahl löschen	ktuelle Seite exportieren		Spalten a	nzeigen oder verbergen:	Spalten a	luswählen	Y
	Gruppe	~	ID Nummer	Endbenutzer	<ul> <li>Notrufgerät</li> </ul>	~	Kanal ~	A Technischer Statu	IS ¥ <sup>~</sup>	Info	
	Austria (Central Europe)		5001		10072921		osm TP	Normaler Betrieb			*
H	4 <b>1</b> P H 5	50 •	objekte pro Seite				/		1 - 1 v	on 1 Posten	0

2.2 Öffnen Sie den Menüpunkt "Installation" und wählen Sie beim Punkt "Betriebszustand" den Unterpunkt "Werte ändern".

neat		RUFGERÄT ENDBENUTZEF	R GRUPPENEREIGNISSE	ADMINISTRATION
		Geräteüberblick		
Technischer Statu	IS	Marke	NEAT	-
Installation		Modell ID Nummer	NOVO 5001	
Zubehör		<ol> <li>Übertragungskanal</li> <li>Übertragungskanal</li> </ol>	asm	
Alarmlog		Seriennummer	10072921 Austria	···· (*
Konfiguration			(Andere Geräte dieser Gruppe anzeigen)	
Seriennummer		Betriebszustand	In Betrieb	
10072921	٩			
ID Nummer		Betriebszustand	Twerte andem	
Suchen	٩	Daten aktualisiert	Synchronisiert	2018-10-04 09:18:04
Notrufgerät hinzufüg	gen	ID Nummer	5001	
csv laden		Endbenutzer		
		Gruppe	Austria	
		Betriebszustand	In Betrieb	
		Marke	NEAT	
		Modell	NOVO	
		Info/Kommentar		



2.3 Wählen Sie beim Dropdown-Menü beim Feld "Betriebszustand" den Zustand "Nicht in Gebrauch" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit "Speichern".

Geräteüberblick		Ó
Marke Modell ID Nummer 1. Übertragungskanal 2. Übertragungskanal Seriennummer Gruppe <b>3</b>	NEAT NOVO 5001 Iminima 10072921 Austria (Andere Geräte dieser Gruppe	
Betriebszustand	In Betrieb	
Betriebszustand	Mt Speichern Abbrechen	
Daten aktualisiert	Synchronisient 2018-10-04 09:36:00	
ID Nummer	5001	
Konfiguration	Ohne Datei V	
Endbenutzer	Ohne Endbenutzer	
Neuer Endbenutzer		
Gruppe	Austria	
Betriebszustand	In Betrieb 🔻	
Marke	Warten auf Installation Nicht in Gebrauch	
Modell	Abgelaufen	
Info/Kommentar		
	10	

2.4 Das Gerät ist nun aus der Liste in der Registerkarte "Status" gelöscht und wird in der Registerkarte "Lager" angezeigt.

ĥ	eat STATUS LAGE	NOTRUFGERÄT	ENDBENUTZER GRUPPENER	REIGNISSE		ADMINISTRATION	Will	kommen (
G	ruppe auswählen:	▼ Q × Au	swahl löschen 🛛 🗉 Tätigkeiten 🛛 Aktue	lle Seite exportieren	Spalten a	nzeigen oder verbergen:	Spalten	auswählei
	Gruppe ~	ID Nummer	🧞 Endbenutzer 🛛 👻	Notrufgerät	Kanal	A Betriebszustand	* ~	Info
	Austria (Central Europe)	5001	-	10072921	asm	Nicht in Gebrauch	h	
-		Objekte pro Seite					1 - 1 1	von 1 Pos



**Hinweis:** das Alarmlog des Gerätes wird nach dem Definieren des Betriebszustandes von "In Betrieb" zu "Warten auf Installation" nicht gelöscht oder zurückgesetzt!



## 3. Notrufgerät suchen

Um ein Notrufgerät, bei welchem die Seriennummer oder ID-Nummer bekannt ist, zu suchen muss wie folgt vorgegangen werden:

3.1 Wechseln Sie in die Registerkarte "Notrufgerät".

neat STATUS LAGER NOT	RUFGERÄT ENDBENUTZER
Technischer Status	Geräteüberblick
Seriennummer	Technischer Status
ID Nummer	Firmwarestatus

3.2 Geben Sie entweder die Seriennummer oder ID-Nummer ein.



Hinweis: Beim Eingeben der ersten Stellen werden automatisch Serien- oder ID-Nummern vorgeschlagen welche bereits angelegt sind.

3.3 Bestätigen Sie die Auswahl mit der Enter-Taste oder der Lupe neben dem Eingabefeld. Die Geräteeinstellungen werden angezeigt und Sie können die Geräteeinstellungen kontrollieren oder umprogrammieren.

		Geräteüberblick			
Technischer Stat	us	Marke	NEAT		
Installation		Modell	NOVO		
		ID Nummer	5001		
Zubehör		2. Übertragungskanal			
Alarmlog Konfiguration		Seriennummer	10072921		
		Gruppe 😏	Austria (Andere Geräte dieser Gruppe anzeigen)		
		Betriebszustand	Nicht in Gebrauch		
Seriennummer					
10072921 Q		Tochnicobor Statue			
D Nummer		isoningener otatus			
Suchen	Q	Technischer Status	Kein Kontakt zum Portal		
Suchen	~	Markinduna zum Dadal	Nom Nombre 2011 1 Orea	2010 10 04 12:22:26	